

Ficha Técnica

Limpiador Antimicrobiano para Piel y Heridas Anasept

Nombre: Anasept Limpiador Antimicrobiano para Piel y Heridas.

Descripción: Es una solución transparente que ayuda en la eliminación mecánica de detritos del sitio de aplicación, al tiempo que sus componentes eliminan los microorganismos patogénicos en la herida y evita la proliferación de nuevos patógenos.

Características y especificaciones:

- Una solución completamente incolora y pura.
- Contiene una concentración precisa de hipoclorito de sodio del 0.057% y 0.85% de Cloruro de Sodio.
- Es una solución totalmente isotónica.
- Es compatible con todos los tejidos.
- Es ampliamente bioseguro: no es citotóxico, no es irritante, no es tóxico, no es sensibilizante.
- No deja residuos tóxicos; sus subproductos son totalmente biodegradables a sal y agua.
- Tiene una vida de dos años bajo condiciones de almacenamiento en temperatura ambiente no excedente a los 25° C.
- Es totalmente estable, tiene un efecto antimicrobiano por hasta 20 minutos en heridas abiertas.

Mecanismos de Acción:

- Es un antimicrobiano de amplio espectro y acción rápida (bactericida, fungicida, esporicida, virucida).
- Realiza un desbridamiento químico y suave del tejido desvitalizado en la herida.
- Controla el olor de las heridas mediante la liberación de radicales libres de oxígeno.

Modo de Empleo


- Desbridar mecánicamente la herida previamente al uso de Anasept si es necesario y posible.
- Rociar profusamente la solución de Anasept en la herida y dejar actuar por 4 minutos aproximadamente.
- Mientras se deja actuar la solución en la herida, se limpia el tejido perilesional con Anasept y gasa estéril.
- Remover cualquier detrito de la herida y secar cualquier exceso de la solución con gasa estéril.
- Cubrir la herida con un apósito adecuado.

Indicaciones

- Ulceras por presión I-IV, heridas de espesor parcial y total, úlceras en pie diabético, úlceras en las piernas, heridas posquirúrgicas, quemaduras de primero y segundo grado, injertos y sitios donadores.

Contraindicaciones

- Pacientes alérgicos al hipoclorito de sodio, no usar en ojos.
- No usar en combinación con apósitos secundarios que contengan metales tales como: plata, bismuto o zinc.

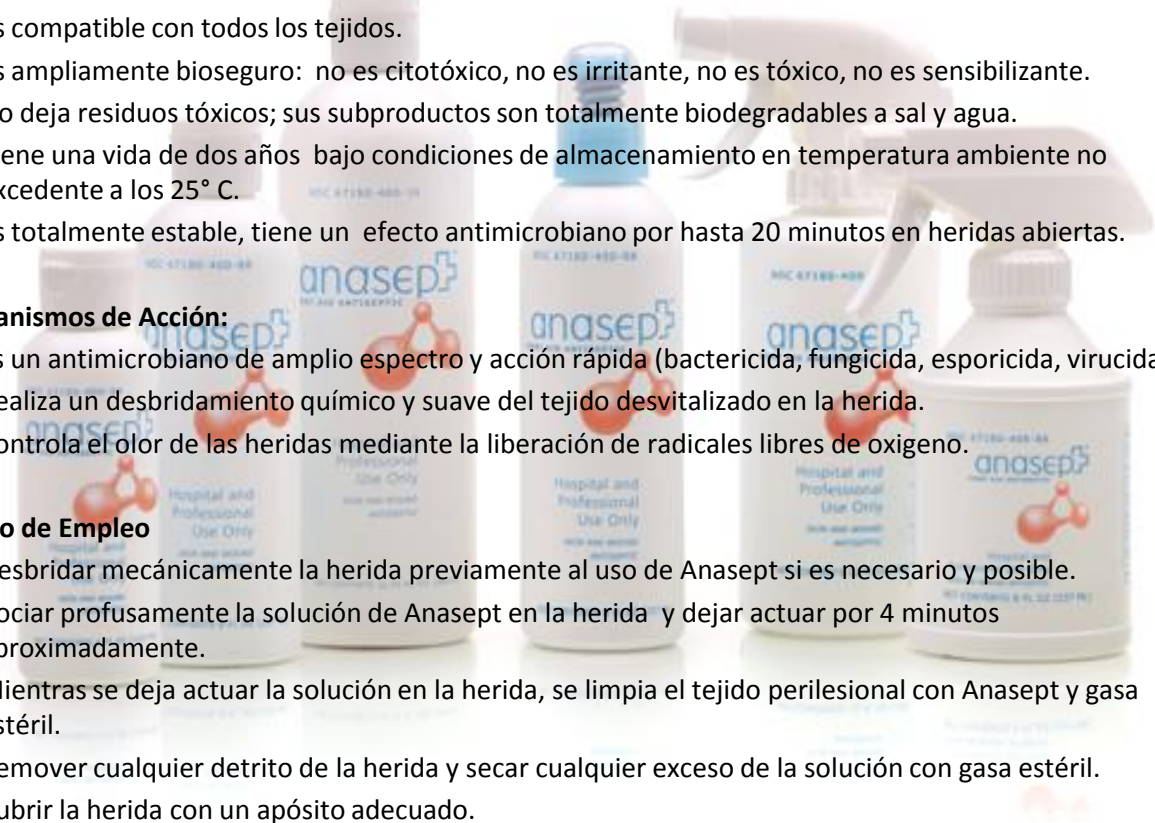

Ficha Técnica
Limpiador Antimicrobiano para Piel y Heridas Anasept

Presentaciones:

No. de Catalogo	Descripcion	Empaque
4008TC	Botella de 8 oz (237 ml) con atomizador de gatillo	12 por caja
4008C	Botella de 8 oz (237 ml) con tapa dispensadora	12 por caja
4016C	Botella de 15 oz (443 ml) con tapa dispensadora	12 por caja

