

Ficha Técnica

Gel Antimicrobiano para Piel y Heridas Anasept

Nombre: Anasept Gel Antimicrobiano para Piel y Heridas.

Descripción: Es un apósito para heridas con hidrogel, el cual es amorfo y ayuda a mantener la herida húmeda mientras sus componentes eliminan los microorganismos patogénicos en la herida y evita la proliferación de nuevos patógenos.

Características y especificaciones:

- Un gel completamente incoloro y puro.
- Contiene una concentración precisa de hipoclorito de sodio del 0.057% y 0.85% de Cloruro de Sodio.
- Es un gel totalmente isotónico.
- Es compatible con todos los tejidos.
- Es ampliamente bioseguro: No es citotóxico, no es irritante, no es citotóxico, no es sensibilizante.
- No deja residuos tóxicos; sus subproductos son totalmente biodegradables a sal y agua.
- Tiene una vida de dos años bajo condiciones de almacenamiento en temperatura ambiente no excedente a los 25° C.
- Es totalmente estable prolongando su efecto antimicrobiano por hasta más de 24 horas en una herida cubierta.

Mecanismos de Acción:

- Es un antimicrobiano de amplio espectro y acción rápida (bactericida, fungicida, esporicida, virucida).
- Realiza un desbridamiento químico y suave del tejido desvitalizado en la herida.
- Controla el olor de las heridas mediante la liberación de radicales libres de oxígeno.

Modo de Empleo


- Desbridar mecánicamente la herida previo al uso de Anasept si es necesario y posible.
- Limpiar la herida con un limpiador adecuado para heridas.
- Aplicar una cantidad generosa de Anasept Gel directamente sobre el lecho de la herida estéril.
- Cubrir la herida con un apósito adecuado que evite la evaporación del producto en la herida y fijar dicho apósito.

Indicaciones

- Ulceras por presión I-IV, heridas de espesor parcial y total, úlceras en pie diabético, úlceras en las piernas, heridas posquirúrgicas, quemaduras de primero y segundo grado, injertos y sitios donadores.

Contraindicaciones

- Pacientes alérgicos al hipoclorito de sodio, no usar en ojos.
- No usar en combinación con apósitos secundarios que contengan metales tales como: plata, bismuto o zinc.

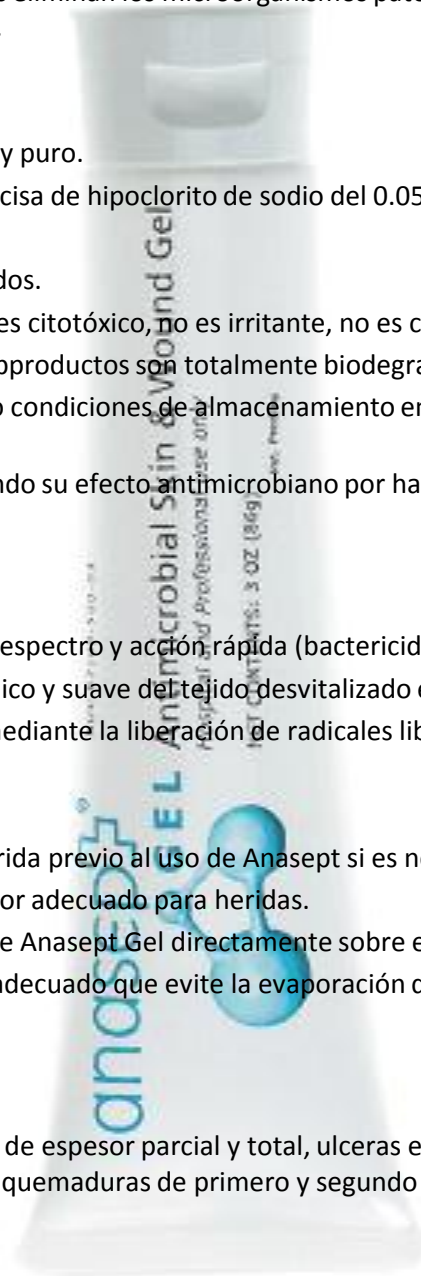

Ficha Técnica
Gel Antimicrobiano para Piel y Heridas Anasept

Presentaciones:

Tubo de 3 oz (86 g)

Tubo brillante blanco de polietileno de baja densidad, etiqueta de información del producto impresa en el tubo.
Largo del tubo: 15.09 cm
Diámetro de la botella: 3.50 cm

Tapa

Tapa blanca abatible

Caja de envío

Material corrugado de estraza, 12 tubos empacados en una caja con divisiones, etiqueta de envío con el número de producto y lote / fecha de caducidad aplicada a la caja

No. de Catalogo

5003G

